

EstheShot

義歯床用熱可塑性レジン

エステショット



即時重合レジンと接着するため、簡単にチェアサイドでの修復が可能です。

※ ノンクラスプデンチャーの製作は保険適用外となります。

ご注意ください。

エステショットの特長

- 新素材（ポリエチレンテレフタレート共重合体）
- リライニングや補修が出来る常温重合型レジンとの良好な接着性。
- 安心して使い続けられるように残留モノマーや溶出物を低減。
- 審美性を損ないにくい低吸水性。
- 色々な義歯に使える適度な粘り強さ。
- フィット感を高める適合性

リベース

- 直接法でのリベースが可能です。（◆加熱重合タイプのリベースは出来ません。）
- 70℃を超える温度で変形・変色を起こす可能性があります。重合促進の際は70℃を超えないように注意してください。

洗浄について

- 義歯は定期的に洗浄を行って下さい。（毎日の洗浄をお勧めします。）
- 歯ブラシを使用する場合は、柔らかい歯ブラシで、歯磨き粉を付けずに洗浄して下さい。
- 超音波洗浄器で洗浄する場合は、水温が高温にならないように注意してください。
- 推奨する義歯洗浄剤 歯科医院用・・・フィジオクリーン プロ※
患者様用・・・フィジオクリーン キラリ錠剤※ ※（株）ニッシン製

■ 使用上の注意点

- ・ クラスプ部分を樹脂で製作できますが、パフォーマンスが出来る素材ではありません。
- ・ pH11を超える洗浄剤は使用しないで下さい。劣化やクラックが生じる恐れがあります。
- ・ 70℃を超えると変形・変色を起こす可能性がありますので、煮沸消毒を行わないで下さい。
※エステショットで製作した義歯を装着して、お茶・アルコール等を飲んでも問題ありません。
- ・ 1歯欠損などの小さい義歯の場合、特に誤飲に注意して下さい。

販売元：**株式会社アイキャスト**

〒604-0847 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町 513

京都第一生命泉屋ビル 8F

TEL 075-257-7270 FAX : 075-257-7271

WEB : www.ircast.jp

お問い合わせ